

**Deckel nur im Notfall öffnen! Achtung: Durch das Öffnen des Deckels wird automatisch der Notruf alarmiert!**

**Über die Trageeinheit wird eine Freisprechverbindung zum Notarzt hergestellt!**

## Ablauf bei Auffinden einer reglosen Person

### Ansprechen und Anfassen

Keine Reaktion

Atemwege freimachen  
und freihalten

### Atemkontrolle

Keine Atmung

Atmung vorhanden

stab. Seitenlage

30 x Herzdruckmassage, dann 2 x beatmen

- Patient auf harte, flache, nicht leitende Unterlage legen
- Oberkörper vollständig entkleiden
- ggf. Brusthaare entfernen, Haut trocknen
- Elektroden blasenfrei aufkleben und mit AED verbinden
- Anweisungen des Gerätes befolgen

Schock empfohlen

Kein Schock empfohlen

- Am Ende der Aufladung sicherstellen, dass niemand den Patienten berührt
- AUF RUF: „Patient nicht berühren!“
- Schock auf Anweisung auslösen

- Herzdruckmassage und Beatmung im Verhältnis 30:2




1. Deckel öffnen




2. Trageeinheit entnehmen



3. Defibrillator öffnen

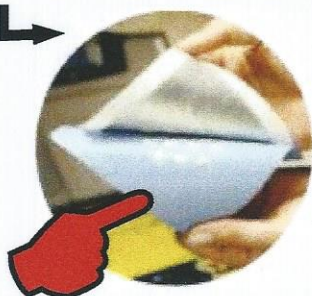

4. Elektrodenpackung aufreißen und Elektroden entnehmen!

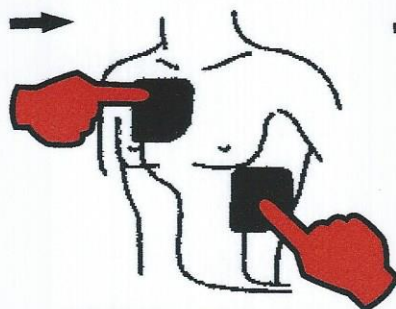

5. Elektroden wie abgebildet auf trockener Haut fest aufkleben! Eventuell rasieren!



6. Falls das Gerät einen Schock anweist, drücken Sie die blinkende Schocktaste!



7. Patienten nicht berühren, Datenauswertung läuft!